

MODALITÉS DE PRÉLEVEMENTS
MP 10 - Version 02

1 MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ✎ Gélose Sabouraud (boîte Ø90 mm).

2 CONSERVATION DU MATÉRIEL DE PRÉLÈVEMENT

Conserver les géloses à 5 °C ± 3 °C. Ne pas utiliser après la date d'expiration indiquée sur la gélose.

3 MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT

- ✎ Laisser la boîte ouverte entre 20 et 30 minutes dans la salle à contrôler.
- ✎ Scotcher le couvercle sur la boîte de gélose.
- ✎ Identifier la gélose au feutre indélébile ou par une étiquette autocollante.

4 CONDITIONNEMENT ET ACHÈMINEMENT DES PRÉLEVEMENTS AU LABORATOIRE

- ✎ Dépôt au laboratoire ou expédition dans les meilleurs délais dans un emballage soigneusement fermé (enveloppe ou glacière).

À RETENIR

1. Laisser la boîte ouverte au moins 20 minutes.