

MODALITÉS DE PRÉLEVEMENTS
MP 12 - Version 02

1 MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ✎ Buvards Whatman N°3.
- ✎ Lames de bistouri pointues N°11.

2 CONSERVATION DU MATÉRIEL DE PRÉLÈVEMENT

Au sec et à l'abri de la poussière.

3 MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT

La prise de sang se fait à la queue (veine coccygienne) :

- ✎ Enfoncer la pointe du bistouri sous la queue en partie médiane à environ 10 cm de sa base.
En cas d'hémorragie placer un garrot pendant 2 heures.

Quelques recommandations pour obtenir un prélèvement sur buvard :

- ✎ Imprégner les buvards sur les deux faces dans toute leur épaisseur et sur au moins la moitié de la surface.
- ✎ Laisser sécher les buvards individuellement.

4 CONDITIONNEMENT ET ACHÈMINEMENT DES PRÉLEVEMENTS AU LABORATOIRE

- ✎ Mettre les buvards dans une enveloppe papier ou dans du papier absorbant pour éviter la condensation.
- ✎ Identifier clairement les buvards.
- ✎ Il est préférable de séparer les feuilles de commémoratifs des échantillons en les mettant dans des enveloppes différentes.
- ✎ Dépôt au laboratoire ou expédition dans les meilleurs délais.
- ✎ Conserver au réfrigérateur si l'expédition a lieu le lendemain.

À RETENIR

1. Imprégner suffisamment le buvard.
2. Bien laisser sécher le buvard.
3. Bien identifier les prélèvements.