

MODALITÉS DE PRÉLEVEMENTS
MP 16 - Version 04

1 MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Kit PEDICHIFF® stérile contenant :

- ✎ 2 paires de pédichiffs.

Recommandé : 1 paire de gants à usage unique, 1 paire de pédisac, 1 sac de suremballage.

2 CONSERVATION DU MATÉRIEL DE PRÉLEVEMENT

À l'abri de la poussière et à température ambiante.

3 MODALITÉS DE PRÉLEVEMENT

Après avoir franchi le sas et s'être préparé de manière adéquate (lavage des mains, changement de tenue : cotte + pédisacs ou bottes d'élevage + gants à usage unique), pénétrer dans le bâtiment d'élevage (= aire de vie des animaux) et :

- ✎ Enfiler les 2 paires de pédichiffs l'une sur l'autre (le sachet plastique s'ouvre en déchirant la bande supérieure et en tirant sur les languettes blanches au milieu du sachet).
- ✎ Marcher sur la moitié du sol du lieu d'hébergement (zone litière et caillebotis).
- ✎ Retirer et plier la 1ère paire de pédichiffs et la replacer immédiatement dans son emballage d'origine.
- ✎ Marcher sur la seconde moitié du sol du lieu d'hébergement (zone litière et caillebotis).
- ✎ Retirer la 2ème paire de pédichiffs et la replacer dans le même emballage que la première.
- ✎ Chasser l'air en pressant le sachet, puis fermer le sachet en tirant sur les 2 extrémités.
- ✎ Replier 3 à 4 fois le bord du sachet sur la partie blanche et rabattre les extrémités des languettes sur le sachet.
- ✎ Identifier le prélèvement sur le sachet avec un feutre indélébile.
- ✎ Il est conseillé de suremballer le prélèvement dans un autre sachet pour éviter les contaminations croisées entre élevages (*ex : sachet zip*).

4 CONDITIONNEMENT ET ACHÈMEMENT DES PRÉLEVEMENTS AU LABORATOIRE

- ✎ Stockage au frais (environ 5°C) si l'échantillon n'est pas déposé ou transporté au laboratoire le jour même.
- ✎ Dépôt au laboratoire ou expédition dans les meilleurs délais dans un suremballage soigneusement fermé (enveloppe ou glacière contenant un pain de glace).

5 CRITÈRES D'ACCEPTATION DES ÉCHANTILLONS

- ✎ Délai d'envoi au laboratoire: <24 h à température ambiante ou < 96h. si échantillons réfrigérés (réception avant 14h et mise en analyse le jour même).

Hors analyses réglementaires : le laboratoire réalisera les analyses en émettant des réserves sur les résultats pour les échantillons reçus avec un délai > 96h. Les échantillons reçus plus de 39 jours après le prélèvement ne seront pas analysés

- ✎ Quantité réglementaire minimum : 2 paires de pédichiffonnettes réunies en un seul échantillon
- ✎ Température de transport : température ambiante (< 24h) ou avec un réfrigérant.
- ✎ Intégrité de l'échantillon : échantillons sureballés et identifiés

Le client doit s'assurer qu'il détient la dernière version en vigueur du présent document sauf dans le cadre d'un contrat de prestations.
Ce document est la propriété de Bio Chêne Vert et ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation écrite.

Rédacteur : J. Massé
Date : 09/03/206

Vérificateur : J.-L. Pinsard
Date : 10/03/2026

Date d'application 16/03/2026

Visa : ORIGINAL SIGNE

Visa : ORIGINAL SIGNE

7.1E10 - v02 - 28/04/2021 - JM
Ap. : 24/05/2021

Prélèvement pour recherche de *Salmonella*
à partir de 2 paires regroupées de
PEDICHIFF®



Page 2 sur 2

MODALITES DE PRELEVEMENTS
MP 16 - Version 04

À RETENIR

1. Marcher sur toute la surface du poulailler (zone litière et caillebotis).
2. Acheminement au laboratoire dans les meilleurs délais et avec réfrigérant si >24h.

Le client doit s'assurer qu'il détient la dernière version en vigueur du présent document sauf dans le cadre d'un contrat de prestations.
Ce document est la propriété de Bio Chêne Vert et ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation écrite.

Rédacteur : J. Massé
Date : 09/03/2016

Vérificateur : J.-L. Pinsard
Date : 10/03/2016

Date d'application 16/03/2016

Visa : ORIGINAL SIGNE

Visa : ORIGINAL SIGNE

7.1E10 - v02 - 28/04/2021 - JM
Ap. : 24/05/2021