

**MODALITES DE PRELEVEMENTS**  
MP 7- Version 06

1

**MATÉRIEL NÉCESSAIRE**

Kit PEDICHIFF® stérile contenant :

- ✎ 1 paire de gants à usage unique.
- ✎ 1 paire de pédisacs (facultatif).
- ✎ 1 paire de pédichiffs.
- ✎ 1 sachet pour récupérer le prélèvement.

2

**CONSERVATION DU MATÉRIEL DE PRÉLÈVEMENT**

À l'abri de la poussière et à température ambiante.

3

**MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT**

Après avoir franchi le sas et s'être équipé de la tenue adéquate, pénétrer dans le bâtiment d'élevage, et :

- ✎ Enfiler la paire de gants.
- ✎ Enfiler la paire de pédichiffs.
- ✎ Marcher dans le bâtiment d'élevage de façon à couvrir la moitié du sol du bâtiment d'hébergement. La paire de pédichiffs doit être portée sur toute la longueur du bâtiment en privilégiant les endroits riches en fientes cæcales.
- ✎ Pour la recherche de *Salmonella* en volaille de chair les 2 paires de pédichiffs doivent couvrir chacune 50 % de la surface du bâtiment, et elles peuvent être remplacées par une seule paire, couvrant 100 % de la surface du bâtiment, et une chiffonnette. Elles sont réunies pour ne constituer qu'un seul échantillon.
- ✎ Retirer et plier la paire de pédichiffs dans le bâtiment d'élevage.
- ✎ Introduire la paire de pédichiffs dans le sachet plastique. Le sachet plastique s'ouvre en déchirant la bande supérieure et en tirant sur les languettes blanches au milieu du sachet.
- ✎ Chasser l'air en pressant le sachet, puis fermer le sachet en tirant sur les 2 extrémités.
- ✎ Replier 3 à 4 fois le bord du sachet sur la partie blanche et rabattre les extrémités des languettes sur le sachet.
- ✎ Identifier le prélèvement sur le sachet avec un feutre indélébile.
- ✎ Il est conseillé de suremballer le prélèvement dans un autre sachet pour éviter les contaminations croisées entre élevages (*ex : sachet zip*).

4

**CONDITIONNEMENT ET ACHÈMEMENT DES PRÉLÈVEMENTS AU LABORATOIRE**

- ✎ Stovkage au frais si le dépôt / transport au laboratoire est > 24h.
- ✎ Dépôt au laboratoire ou expédition dans les meilleurs délais dans un suremballage soigneusement fermé (enveloppe ou glacière).

5

**CRITÈRES D'ACCEPTATION DES ÉCHANTILLONS**

- ✎ Délai de réception au laboratoire : < 24 h à température ambiante ou < 96h si échantillons réfrigérés (réception avant 14h et mise en analyse le jour même)
- Hors analyses réglementaires : le laboratoire réalisera les analyses en émettant des réserves sur les résultats pour les échantillons reçus avec un délai > 96h. Les échantillons reçus plus de 39 jours après le prélèvement ne seront pas analysés
- ✎ Quantité réglementaire minimum : une ou deux paires de pédichiffs selon les textes réglementaires

**Le client doit s'assurer qu'il détient la dernière version en vigueur du présent document sauf dans le cadre d'un contrat de prestations.**  
*Ce document est la propriété de Bio Chêne Vert et ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation écrite.*

Rédacteur : J. Massé  
Date : 09/03/206

Vérificateur : J.-L. Pinsard  
Date : 10/03/2026

Date d'application 16/03/2026

Visa : ORIGINAL SIGNE

Visa : ORIGINAL SIGNE

7.1E10 - v02 - 28/04/2021 - JM  
Ap. : 24/05/2021

**MODALITES DE PRELEVEMENTS**  
MP 7- Version 06

- ✎ Température de transport : température ambiante (rapidement) ou glacière.
- ✎ Intégrité de l'échantillon : échantillon suremballé et identifié.

**À RETENIR**

1. Les pédichiffs doivent être enfilées dans l'aire de vie des animaux.
2. Marcher sur toute la longueur du bâtiment d'élevage pendant au moins 3 minutes (1 aller-retour).
3. Protéger le sachet de prélèvement par un suremballage pour le transport au laboratoire.

**Le client doit s'assurer qu'il détient la dernière version en vigueur du présent document sauf dans le cadre d'un contrat de prestations.**  
*Ce document est la propriété de Bio Chêne Vert et ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation écrite.*

**Rédacteur :** J. Massé  
**Date :** 09/03/2016

**Vérificateur :** J.-L. Pinsard  
**Date :** 10/03/2016

**Date d'application** 16/03/2016

**Visa :** ORIGINAL SIGNE

**Visa :** ORIGINAL SIGNE

7.1E10 - v02 - 28/04/2021 - JM  
Ap. : 24/05/2021